

Biuletyn techniczny

Nr biuletynu: TB-0029		Data: 2018-11-16
Urządzenie: fabian Therapy evolution / fabian +nCPAP evolution		Nasz znak ref.: FSCA 18-003
Oprogramowanie: wszystko	Sprzęt: Fronty obudowy urządzeń o PN: 121212 i 122212 w okresie od 1 stycznia 2017 do 1 czerwca 2018 fabian Therapy evolution o nr seryjnym: AT-01572 do AT-03025 fabian +nCPAP evolution o nr seryjnym: AN-01803 do AN-03013	
Opis: jak zidentyfikować fronty obudów urządzeń fabian evolution, których dotyczy zawiadomienie		
<input checked="" type="checkbox"/> Obowiązkowe <input type="checkbox"/> W razie konieczności <input type="checkbox"/> Zgodnie z informacją		

Informacja:

Na podstawie reklamacji klientów i analiz wewnętrznych firma ACUTRONIC zidentyfikowała problem z frontami obudów urządzeń z linii produktów fabian evolution. W okresie od stycznia 2017 do maja 2018 roku instalowaliśmy fronty obudowy i wysyłaliśmy je jako części zamienne.

Pierwotną przyczyną jest problem z blokiem klawiszy na tych frontach obudowy. W wymienionym okresie występowały pewne problemy podczas procesu produkcji tych bloków klawiszy. Te problemy mogłyby prowadzić do zwarcia i wystąpienia wyżej wymienionych skutków.

Jak zidentyfikować fronty, których dotyczy zawiadomienie:

Fronty obudów, których dotyczy zawiadomienie, można łatwo zidentyfikować bez jakichkolwiek narzędzi, nawet w przypadku ich zamontowania na urządzeniu.



Istnieje jedna zauważalna różnica między frontami, których dotyczy zawiadomienie („złymi”), a frontami nieobjętymi zawiadomieniem („dobrymi”):

- „Złe” fronty nie mają krawędzi między szkłem ekranu dotykowego a blokiem klawiszy (patrz zdjęcie: front obudowy, którego dotyczy zawiadomienie)
- „Dobre” fronty mają krawędź między szkłem ekranu dotykowego a blokiem klawiszy (patrz zdjęcie: dobry front obudowy)

Krawędź taką można zobaczyć i wyczuć. Należy po prostu przesunąć palcem nad tym przejściem między szkłem a częścią plastikową. Jeśli nie ma wyczuwalnej krawędzi, front należy wymienić i zezłomować.

Używane części:

121212	Front obudowy, kompletny, różowy, do urządzenia fabian Therapy evolution
122212	Front obudowy, kompletny, niebieski, do urządzenia fabian +nCPAP evolution

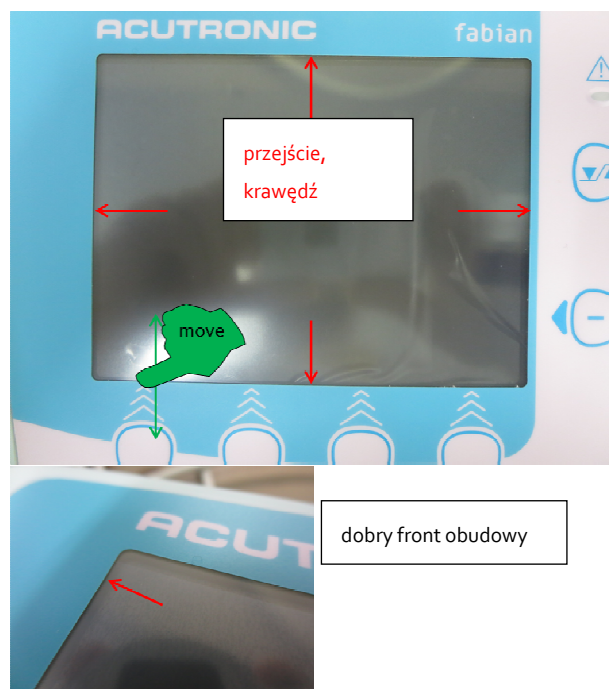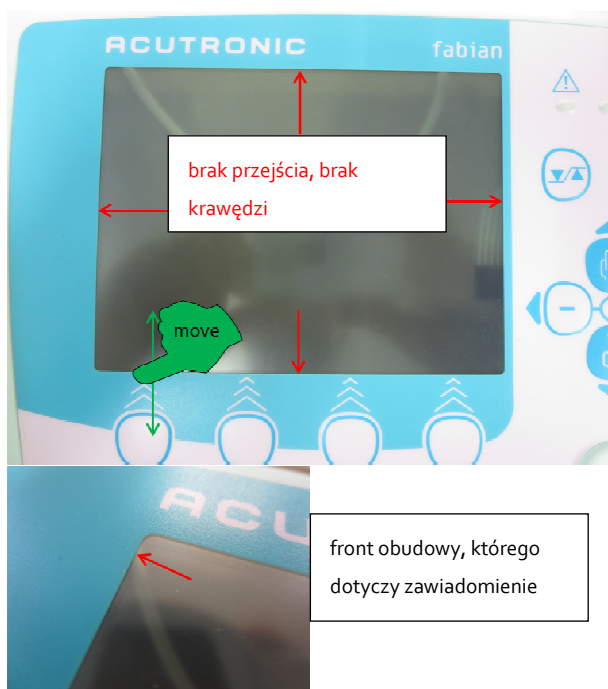

Testy do wykonania:

W przypadku wymiany na urządzeniu zalecamy przeprowadzenie kompletnej kontroli systemu zgodnie z instrukcją testu TS-AA-02e dla urządzenia fabian Therapy evolution oraz zgodnie z instrukcją testu TS-AA-03e dla urządzenia fabian +nCPAP evolution.

Obowiązkowy jest w szczególności test działania wszystkich przycisków, diod LED i ekranu dotykowego.

Po zakończonej powodzeniem kontroli urządzenia należy wykonać test bezpieczeństwa.

Imię i nazwisko oraz funkcja:
Goran Focic, Dział techniczny

Data: _____ Podpis: _____

Imię i nazwisko oraz funkcja:
Raphael Grüter, PM Neonatologia

Data: _____ Podpis: _____