

Carl Zeiss Sp. z o.o.
Oddział w Warszawie,
ul. Łopuszańska 32,
02-220 Warszawa
Telefon: +48 / 22 / 20 55 555

**IOL MASTER 500 – AKCJA KOREKCYJNA
OBOWIĄZKOWA AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA**

WYMAGANE NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIE

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup urządzenia IOL Master 500 firmy Zeiss. Naszym głównym celem jest dostarczanie urządzeń wysokiej jakości, ale priorytetem jest dla nas Państwa bezpieczeństwo i zadowolenie. W celu zapewnienia możliwości bezpiecznego korzystania z naszych systemów, oraz zachowaniu wysokiego poziomu jakości, firma Carl Zeiss informuje o konieczności wykonania akcji korekcyjnej.

Niniejszym pismem chcemy poinformować Państwa o obowiązkowej aktualizacji oprogramowania dla urządzenia IOL Master. Dotyczy to wyłącznie urządzeń IOL Master 500 z wersją oprogramowania 7.5.2, 7.7.2 oraz 7.7. 3. Urządzenia posiadające inne wersje oprogramowania działają prawidłowo.

Urządzenia wyposażone w w/w oprogramowanie posiadają błąd, który w rzadkich wypadkach (przy użyciu niestandardowej kolejności wykonywanych czynności), może skutkować nieprawidłowymi obliczeniami IOL wyświetlanymi na ekranie oraz pokazywanymi na wydrukach / w eksporcie

Poniżej przedstawiono wskazówki dotyczące określenia wersji oprogramowania oraz instalacji aktualizacji oprogramowania, która koryguje ten błąd.

JAK SPRAWDZIĆ WERSJĘ OPROGRAMOWANIA

Wersję oprogramowania można sprawdzić przyciskając symbol “i” w górnym prawym rogu ekranu.

The screenshot shows the 'Patient manager' interface with a red box highlighting the information icon 'i' in the top right corner. The 'About IOLMaster® Advanced Technology' dialog box is open, displaying the following information:

ZEISS

Copyright Carl Zeiss 1999, 2013

IOLMaster, Version: 7.7.2.0000

Ker. DII : 2.00.0064
ACD. DII : 1.00.0002
Wzw. DII : 1.04.0006
GIF : 0.00.0000
Database : 1.00.0003
Cornea. DII : 1.01
Piol DII : 1.02
Lasiol DII : 1.01
Lasiolh DII : 1.00
Ver. DLL: 3.2.0.18699
Computer name: WINXPWORK

IOLMaster,
SW Option Sonolink
© Carl Zeiss 1999, 2013

IOLMaster,
SW Option N
© Carl Zeiss 1999, 2008

IOLMaster,
SW Option T
© Carl Zeiss 1999, 2008

IOLMaster,
SW Option Holladay 2
© Carl Zeiss 1999, 2011

10 Years IOLMaster*
Beyond Biometry
2009

The Winner of
Innovationspreis Thüringen
2010

IOLMaster from Carl Zeiss

OK Print system information

W JAKI SPOSÓB AKTUALIZOWAĆ OPROGRAMOWANIE

W celu naprawy błędu oprogramowania wymagane jest przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania do wersji 7.5.3 lub 7.7.4 przy pomocy dołączonej pamięci USB postępując zgodnie ze wskazówkami z dołączonej instrukcji.

Jeśli nie są Państwo pewni jak przeprowadzić aktualizację, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem, który udzieli Państwu pomocy.

POTWIERDZENIE WYKONANIA AKTUALIZACJI

Po zakończeniu aktualizacji lub po sprawdzeniu, że Państwa IOL Master nie działa na wadliwej wersji oprogramowania, prosimy o wypełnienie i odesłanie załączonego formularza na adres:

Carl Zeiss Sp. z o.o.
Oddział w Warszawie,
ul. Łopuszańska 32,
02-220 Warszawa

Załączniki:

- A) Instrukcja aktualizacji
- B) Pamięć USB zawierająca aktualizację oprogramowania
- C) Formularz potwierdzenia


Załącznik A: Instrukcja aktualizacji oprogramowania IOL Master

Aktualizacja do wersji oprogramowania 7.5.3 (lub 7.7.4) odbywa się poprzez wykonanie poniższych kroków:


- 1) Włóż pamięć USB, zawierającą plik aktualizacyjny.

Uwaga: Przed instalacją wszystkie pozostałe pamięci przenośne należy odłączyć od IOL Master. Podczas instalacji podłączona może być wyłącznie pamięć USB z nową wersją oprogramowania.

- 2) W polu “Settings”, przejdź do pozycji “Program”.

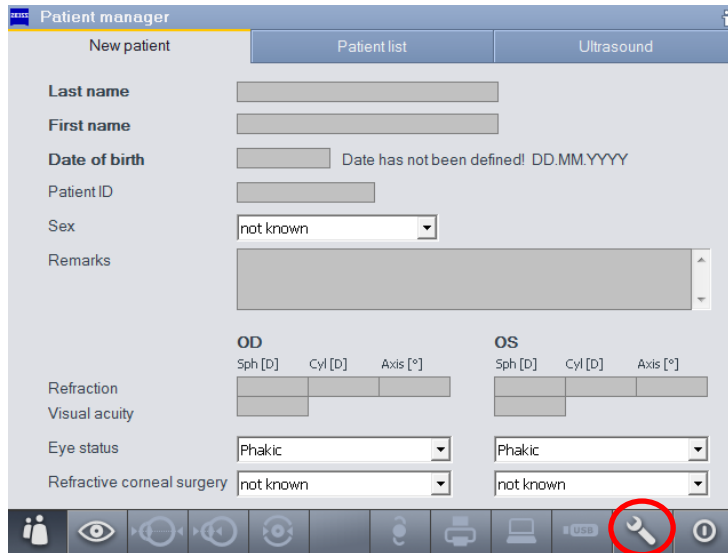

- 3) Lewym przyciskiem kliknij na “Update”

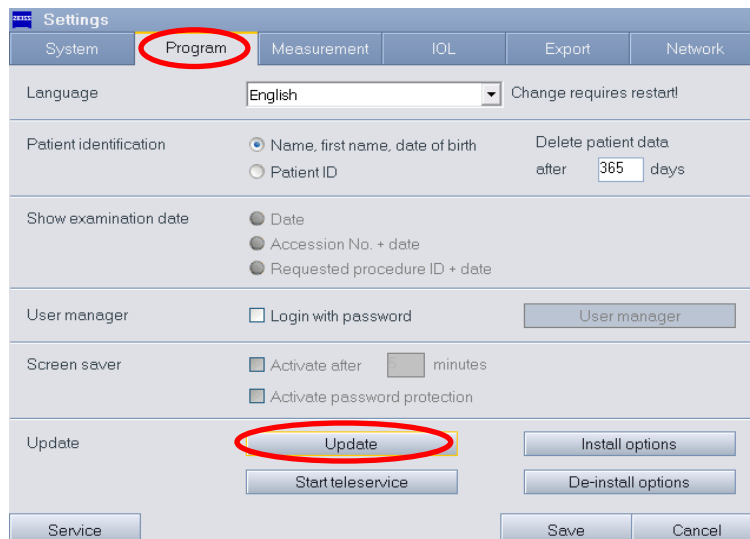

- 4) Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.

Uwaga:

Zakończenie aktualizacji oprogramowania może zająć do dwóch minut. Prosimy nie przerywać ani nie wyłączać procesu aktualizacji.

Uwaga:

W przypadku problemów z przeprowadzeniem aktualizacji prosimy o kontakt z lokalnym partnerem w celu uzyskania pomocy.

**Załącznik C: Formularz obowiązkowego potwierdzenia aktualizacji oprogramowania
IOL Master**

Wypełniony formularz prosimy odesłać na adres:

Carl Zeiss Sp. z o.o.
Oddział w Warszawie,
ul. Łopuszańska 32,
02-220 Warszawa

- Otrzymałem powiadomienie od Carl Zeiss Meditec dotyczące błędu oprogramowania, który, w rzadkich wypadkach stosowania niestandardowego przepływu zadań, może skutkować nieprawidłowymi obliczeniami IOL wyświetlanymi na ekranie oraz na wydruku/w eksporcie.
- Przekazałem tę informację wraz z zalecanymi działaniami swoim współpracownikom i personelowi.
- Przeprowadziłem wymaganą(ne) aktualizację(e) oprogramowania.

Podpis: _____

Imię i Nazwisko: _____

Data: _____

Klient: _____

Adres: _____