


NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA NA TEMAT SPACERÓWKI PIXI

Drodzy użytkownicy wózka PIXI

Ze względu na to że zabrakło dokładnej informacji w naszej instrukcji (którą załączaliśmy do spacerówki PIXI) zauważyliśmy, że istnieje nieduże ryzyko że złączenie w uchwycie może pęknąć ze względu na złe użytkowanie. Ta notatka to wyjaśnienie jak prawidłowo używać uchwytu i wózka aby wnieść go po schodach. Nowa instrukcja jest zaktualizowana o tą informację.

• UWAGA! Kiedy używamy wózka na schodach i kiedy unosimy go uchwyt może być złożony. Chwyć za zgięcia przy uchwycie, będzie to najbezpieczniejszy sposób na użytkowanie wózka oraz transportowanie dziecka.

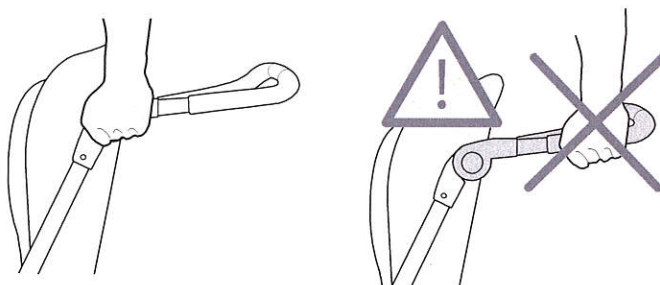

Ta notatka musi zostać przesłana do wszystkich odbiorców produktu, którzy mogli być narażeni na to ryzyko. Jeśli otrzymałeś tą informację do domu tzn. że została ona przesłana w trosce o Twoje bezpieczeństwo i zdrowie. Wszystkie dane kontaktowe pozostają poufne, nie będą używane w żadnym innym celu, ani przechowywane przez firmę Eurovema.

Niżej podpisany niniejszym informuje, że ta notatka została zgłoszona do odpowiednich instytucji.

2015-12-15

Vesa Järvenpää

Vesa Järvenpää

Technical Manager

Eurovema Mobility AB, Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved

Phone +46 371 390 100