

NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA

Produkt:

- Endoskop EG-760R, EG-760Z, EC-760R-V/M, EC-760R-V/I, EC-760R-V/L, EC-760ZP-V/M i EC-760ZP-V/L
- Endoskop ultrasonograficzny EG-580UT i EG-580UR

Rodzaj działania: Powiadomienie o aktualizacji instrukcji obsługi

Szanowni Klienci,

Firma FUJIFILM przekazuje Notatkę bezpieczeństwa dotyczącą następujących modeli endoskopów: EG-760R, EG-760Z, EC-760R-V/M, EC-760R-V/I, EC-760R-V/L, EC-760ZP-V/M, EC-760ZP-V/L i endoskopów ultrasonograficznych EG-580UT i EG-580UR.

W niniejszej Notatce bezpieczeństwa przekazujemy Państwu następujące informacje:

- na czym polega problem
- jakie działania powinny być podjęte przez klienta/użytkownika

Niniejszy dokument zawiera ważne informacje w celu dalszego bezpiecznego i prawidłowego stosowania posiadanego przez Państwa sprzętu.

Prosimy o podzielenie się poniższymi informacjami z wszystkimi członkami personelu, którzy powinni znać treść niniejszego komunikatu. Ważne jest zrozumienie informacji zawartych w niniejszym komunikacie i ich konsekwencji.

Opis problemu

W przypadku uszkodzenia szczoteczki do czyszczenia wewnątrz kanału podczas czyszczenia endoskopu, w instrukcji obsługi podano, że należy usunąć wszelkie pozostałości z wnętrza kanału używając zapasowej szczoteczki. Jeśli pozostałości zostaną w kanale mogą być źródłem infekcji. Jednak, w przypadku szczoteczki do czyszczenia WB7024FW i wymienionych powyżej modeli endoskopów, okazało się, że czasem nie udaje się usunąć pozostałości szczoteczki do czyszczenia stosując tą metodę.

Firma FUJIFILM dostarczyła zaktualizowaną instrukcję obsługi „Czyszczenie, dezynfekcja i przechowywanie”.

Po jej otrzymaniu, należy stosować się do opisu w zaktualizowanej instrukcji obsługi. W szczególności, należy zwrócić uwagę na poniższe punkty:

- Przed użyciem i po każdym czyszczeniu, należy dokładnie sprawdzić wszystkie szczoteczki do czyszczenia pod kątem nieprawidłowości i/lub uszkodzenia.
- Jeśli dojdzie do uszkodzenia szczoteczki do czyszczenia podczas czyszczenia i jeśli całkowite usunięcie pozostałości, nawet z użyciem zapasowej szczoteczki, nie jest możliwe, należy bezzwłocznie oddać endoskop do naprawy.

Działania do podjęcia przez klienta/użytkownika

- (1) Procedurę czyszczenia i dezynfekcji produktu należy przeprowadzać zgodnie z opisem w zaktualizowanej instrukcji obsługi.
- (2) Należy wyrzucić wszystkie egzemplarze poprzedniej wersji instrukcji obsługi.

Firma FUJIFILM jest zaangażowana w zapewnianie produktów i usług najwyższej jakości. Państwa zadowolenie z produktów FUJIFILM oraz z naszej reakcji na niniejszą kwestię ma dla

Notatka bezpieczeństwa dot.: FSN 20160812 endoskopy

bardzo duże znaczenie.

W razie pytań dotyczących tej kwestii prosimy o kontakt z lokalnym biurem FUJIFILM.

Z poważaniem

FUJIFILM

Do wszystkich spółek zależnych FUJIFILM, oddziałów i sprzedawców:

TUTAJ NALEŻY WPISAĆ LOKALNE DANE KONTAKTOWE!

Notatka bezpieczeństwa dot.: FSN 20160812 endoskopy

NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA

Formularz zwrotny dla klienta

Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza zwrotnego oraz odesłanie go faksem lub pocztą elektroniczną.

Dziękujemy za współpracę.

Klient/Nazwa placówki:

Adres:

Numer seryjny instrumentu:

Potwierdzam otrzymanie i zrozumienie załączonej notatki.

Niniejsza notatka nie dotyczy mojej placówki.

Urządzenie przekazano innej organizacji.

Nazwa/Nazwisko klienta:

Stanowisko:

Podpis:

Data:

Numer telefonu:

Jeśli posiadane przez nas Państwa informacje kontaktowe są nieprawidłowe, prosimy o ich skorygowanie poniżej:

Klient/Nazwa placówki:

Adres:

Wypełniony formularz należy przesłać FAKSEM lub pocztą elektroniczną do:

Do wszystkich spółek zależnych FUJIFILM, oddziałów i sprzedawców:

FAX: WYPEŁNIJ TUTAJ

Email: WYPEŁNIJ TUTAJ