



Pilna notatka bezpieczeństwa

Ograniczenie w obliczaniu czasu APEX w oprogramowaniu PatientOnLine w wersji 6.2

Data: 17 grudnia 2019

Szanowni Państwo,

w ramach naszego stałego procesu zapewniania jakości stwierdzono, że zastosowana metoda obliczania czasu APEX (*Accelerated Peritoneal Equilibration Assessment*) w oprogramowaniu PatientOnLine (POL) wersja 6.2 może prowadzić do wyników odbiegających od czasu APEX. Obliczanie czasu APEX w POL 6.2 nie jest oparte na oryginalnym teście APEX zdefiniowanym i opublikowanym przez dr C. Verger'a¹.

Niepoprawne obliczenie czasu APEX może prowadzić do niewłaściwych zaleceń. Wielokrotne kolejne zabiegi mogą powodować uzyskanie wyników poniżej oczekiwań w zakresie usuwania substancji rozpuszczonych i ultrafiltracji.

Aby uniknąć ryzyka niewłaściwych zaleceń, prosimy o zaprzestanie korzystania z funkcji obliczania czasu APEX w oprogramowaniu POL 6.2.

Prosimy upewnić się, że wszyscy użytkownicy POL 6.2 oraz inne zainteresowane osoby w Państwa organizacji są poinformowane o niniejszej informacji dotyczącej bezpieczeństwa.

Serdecznie przepraszamy za niedogodności i deklarujemy naprawę usterki w jak najszybszym czasie.

W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko: Katarzyna Ucińska

Numer telefonu: 61 8392 619

E-mail: katarzyna.ucinska@fmc-ag.com

Z poważaniem

mgr farmacji Katarzyna Ucińska


Kierownik Hurtowni Farmaceutycznej
03064863

Odniesienia

1. Verger C, Larpent L, Veniez G, Brunetot N, Corvaisier B. L'APEX ... description et utilisation. Bull Dial Perit 1991; 1(2): 36-40.