

Wskazówki bezpieczeństwa na miejscu pracy

Nazwa / model produktu: Przenośny aparat dentystyczny/ DU893

FSCA-Identyfikator: BfArM-Fallnummer: 10805/17

Rodzaj działania: Wysyłka akcesoriów do dystrybutora

Uwaga:

Celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie następujących informacji:

Dotyczy w szczególności urządzeń:

Przenośny aparat dentystyczny, model: DU893

Opis problemu:

Podczas użytkowania zasysacza śliny, płyn i powietrze wpadają przez tubę do butelki na brudną wodę. Poprzez ciśnienie, powietrze wpada przez trzy poziome perforacje do butelki na górze na brudną wodę. Wraz z wypchniętym powietrzem mogą wydostać się zainfekowane materiały jak wirusy i bakterie, które mogą być wdychane przez pobliskie osoby, np. dentystów, pielęgniarki, pacjentów i mogą prowadzić do zarażenia.

Sugestie dotyczące działań, które powinien podjąć sprzedawca:

1. Przesłać niniejsze zawiadomienie do wszystkich odpowiedzialnych osób w szpitalu lub klinice, które zakupiły aparat dentystyczny DU893 od Dystrybutora.
2. Należy poinformować ich, że gdy używany jest DU893, należy zwrócić uwagę na poziom wody w zbiorniku. Jeżeli poziom wynosi ok. pół butelki, należy wylać zawartość butelki, następnie zamontować ją z powrotem i kontynuować użytkowanie urządzenia.
3. Jeśli otrzyma się od klienta informację zwrotną dotyczącą powyższych problemów, należy poinformować producenta, w celu niezwłocznej wysyłki dodatkowej butelki do użycia z urządzeniem DU893.
4. Należy zapoznać się z dodatkiem w celu poznania szczegółowej procedury wymiany nowej butelki.

Przekazanie niniejszego zawiadomienia dotyczącego bezpieczeństwa:

Powiadomienie to należy przekazać każdemu pracownikowi firmy, który musi o tym wiedzieć, lub do jakiegokolwiek organizacji, która może być w posiadaniu wskazanego urządzenia.

Należy zapoznać się z tym ostrzeżeniem i podjąć odpowiednie działania w celu zwiększenia skuteczności działań naprawczych.

Jeśli potwierdzisz otrzymanie tego listu, będziemy bardzo wdzięczni. Wypełnij poniższy formularz potwierdzenia i zwróć e-mailem lub faksem.

Kontakt:

Przepraszamy za niedogodność. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami.

Nazwa firmy: Jiangsu Dynamic Medical Technology Co., Ltd

adres: No.108 Xingpu Road, Lujia, Kunshan, Jiangsu, 215331, China

Kontakt: Leo Liu

Tel: 0086-0512-82627666

Faks: 0086-0512-82603908

Poczta: sales@dynamicgroup.cn

Niniejsze zawiadomienie zostało zgłoszone odpowiedniej agencji regulacyjnej.

(Akapit końcowy)

Podpis _____

Formularz potwierdzenia

=====

Potwierdzenie odbioru powiadomienia bezpieczeństwa na miejscu pracy

Dotyczy produktów: Przenośny aparat dentystyczny/ DU893

FSCA : BfArM-Fallnummer: 10805/17

Typ FSCA : Raport wstępny

=====

Wypełnij ten formularz i niezwłocznie odpowiedz na to poprzez e-mailem lub faksem.

Faks:

E-mail:

pełne imię i nazwisko: _____

Tel: _____

Adres e-mail: _____

Data i podpis: _____

Adres firmy:
