

Notatka bezpieczeństwa

Sieć dystrybucji oprogramowania i powiązane programatory

Aktualizacja oprogramowania

Nazwa produktu	Numer modelu
Programator CareLink™ 2090	2090; Wszystkie numery seryjne
Programator CareLink Encore™ 29901	29901; Wszystkie numery seryjne

marzec 2020

Nr ref. firmy Medtronic: FA844 Faza III

Szanowni Państwo

Medtronic pragnie niniejszym poinformować o dwóch ulepszeniach w zakresie cyberbezpieczeństwa oprogramowania dla programatorów wskazanych powyżej.

Sieć dystrybucji oprogramowania (SDN): Aktualizacja komunikatu z października 2018 r.

Pierwsze ulepszenie dotyczy Sieci dystrybucji oprogramowania firmy Medtronic (SDN). SDN to ogólnosięciowa sieć pozwalająca na pobieranie nowego lub zaktualizowanego oprogramowania dla programatorów CareLink 2090 i CareLink Encore 29901 przez Internet. W dn. 11 października 2018 r., we współpracy z doradcą jednostką zewnętrzną, firma Medtronic opublikowała Biuletyn Bezpieczeństwa i tymczasowo wyłączyła dostęp z zewnątrz do SDN (więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie: <http://www.medtronic.com/security>). Luki w zabezpieczeniach opisane w Biuletynie Bezpieczeństwa zostały wyeliminowane; dalsze działania nie są wymagane. Programatory mogą teraz zostać podłączone do Internetu i zaktualizowane za pośrednictwem SDN w sposób opisany w instrukcji obsługi programatorów. Prosimy zapewnić dalszą odpowiednią fizyczną kontrolę nad programatorem, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Telemetria Conexus™: firmy Medtronic: Aktualizacja komunikatu z marca 2019 r.

Drugie ulepszenie obejmuje aktualizacje oprogramowania mające na celu usunięcie luk w cyberbezpieczeństwie związanych z Telemetrią Conexus™ firmy Medtronic. Telemetria Conexus to zastrzeżony protokół bezprzewodowej komunikacji radiowej pomiędzy programatorami Medtronic a określonymi ICD (wszczepialnymi kardiowerterami-defibrylatorami) oraz CRT-D (wszczepialnymi defibrylatorami do terapii resynchronizacyjnej serca) firmy Medtronic. W dn. 21 marca 2019 r. Medtronic opublikowała Biuletyn Bezpieczeństwa dotyczący przedmiotowych luk w zabezpieczeniach. Dodatkowe informacje, w tym listę urządzeń objętych zakresem niniejszego komunikatu, znaleźć można w Biuletynie Bezpieczeństwa na stronie: <http://www.medtronic.com/security>. Po udostępnieniu oprogramowania pozwalającego na wyeliminowanie przedmiotowych luk w zabezpieczeniach, Medtronic dokona aktualizacji programatorów.

Właściwy urząd w Państwa kraju został już poinformowany o tej akcji.

Niniejsza informacja powinna zostać przekazana wszystkim osobom, których dotyczy w Państwa organizacji lub w każdej innej organizacji, której przekazano programatory.

Medtronic pozostaje oddany bezpieczeństwu pacjentów i będzie w dalszym ciągu monitorował działanie systemu, aby mieć pewność, że zaspokajamy potrzeby Państwa i Państwa pacjentów. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym Medtronic.

Z wyrazami szacunku

Medtronic Poland Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Anna Pajuk-Kasprzak