

PILNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Rodzaj działania:			Zawiadomienie		
Nr referencyjny Teleflex:			006-2014		
Nazwa handlowa	Kod produktu	Numer partii	Nazwa handlowa	Kod produktu	Numer partii
ZBROJONA RURKA DOTCHAWICZA, ZAGIĘTA – OTWÓR MURPHY, WYSOKOOBJĘTOŚCIOWY, NISKOCIŚNIENIOWY MANKIET - OPAKOWANIE STERYLNE	103902-000035	Patrz załącznik 2	ZBROJONA RURKA DOTCHAWICZA, ZAGIĘTA - OTWÓR MURPHY, WYSOKOOBJĘTOŚCIOWY, NISKOCIŚNIENIOWY MANKIET - OPAKOWANIE STERYLNE	103902075	Patrz załącznik 2
	103902-000040		RURKA DOTCHAWICZA ENDOSOFT - MANKIET NISKOCIŚNIENIOWY - TYP MURPHY - OPAKOWANIE STERYLNE	672482-000030	
	103902-000045			672482-000035	
	103902-000050			672482-000040	
	103902-000055		ZBROJONA RURKA DOTCHAWICZA RUSCHFLEX, TYP MAGILL Z MANKIETEM, STERYLNA	104201-000070	
	103902-000060			104201-000075	
	103902-000065		ZBROJONA RURKA DOTCHAWICZA RUSCHFLEX, TYP MURPHY Z MANKIETEM, STERYLNA	104202-000070	
	103902-000070			104202-000075	
	103902-000075			104202-70SR	
	103902035			104202-70STR	
	103902040			104202-75SR	
	103902045			104202-75STR	
	103902050		ZESTAW RUSCHFLEX - ZBROJONA RURKA DOTCHAWICZA Z MANKIETEM, STERYLNY	104203-000070	
	103902055			104203-000075	
	103902060		ZESTAW RUSCHFLEX – ZBROJONA RURKA DOTCHAWICZA Z MANKIETEM - TYP MURPHY – Z PROWADNICĄ -STERYLNY	104204-000070	
	103902065			104204-000075	
	103902070				

Szanowni Państwo,


1. Szczegółowe informacje dotyczące uszkodzonych wyrobów

Firma Teleflex wydała zawiadomienie dotyczące bezpieczeństwa stosowania wymienionych powyżej produktów.

2. Opis problemu

Firma Teleflex publikuje niniejsze zawiadomienie w celu poinformowania klientów o nieznacznej rozbieżności pomiędzy średnicą mankieta podaną na etykiecie a faktyczną średnicą mankieta wymienionych powyżej rurek dotchawiczych. Średnica mankieta produktu jest zgodna z wymaganą specyfikacją. Do daty publikacji niniejszego zawiadomienia, nie otrzymaliśmy żadnych reklamacji od klientów.

Możliwe są dwie sytuacje, średnica mankieta podana na etykiecie będzie mniejsza lub większa od rzeczywistej

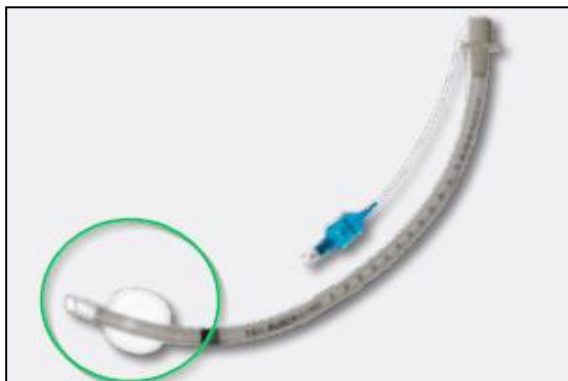

średnicy. W przypadku gdy średnica podana na opakowaniu będzie większa, odpowiednią wentylację można osiągnąć jeśli mankiety zostaną napompowane do standardowego ciśnienia dla danego zakresu rozmiarów. W przypadku gdy średnica podana na opakowaniu będzie mniejsza, stosowanie niskociśnieniowych mankietów wysokoobjętościowych nie wiąże się z ryzykiem, ponieważ lekarz napełnia je wolno, aby zapewnić odpowiednią wentylację bez ryzyka urazu tchawicy.

Nie istnieje żadne ryzyko kliniczne związane ze stosowaniem niniejszych produktów, ponieważ różnice w średnicy mankietów podane na etykiecie są minimalne, a rzeczywiste średnice mankietów są odpowiednie do uzyskania właściwej wentylacji u danej grupy pacjentów i nie są tak duże, aby spowodować uraz tchawicy.

ZAWIADOMIENIE DOT. DZIAŁAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO - INSTRUKCJE:

1. ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZEZNACZONE DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

Prosimy o przekazanie niniejszego zawiadomienia dot. działań zapewniających bezpieczeństwo wszystkim zainteresowanym osobom w Państwa organizacji. Prosimy pamiętać o powiadomieniu lekarzy, dyrektorów ds. zagrożeń, ośrodków łańcucha dostaw i dystrybucji itd. Dalsze działania nie są wymagane.

Zalecenie kliniczne dotyczące pacjenta to standardowa procedura kliniczna dokładnego sprawdzenia czy wentylacja pacjenta jest odpowiednia a także właściwe dopasowanie rozmiaru rurki dotchawiczej dla pacjenta podczas intubacji.

INSTRUKCJA DLA DYSTRYBUTORÓW USZKODZONEGO PRODUKTU

Jeśli jest Pan/Pani dystrybutorem, prosimy o przekazanie niniejszej informacji dot. działań zapewniających bezpieczeństwo, wszystkim klientom, którzy otrzymali produkty objęte niniejszym zawiadomieniem. Informujemy, że wszystkie stosowne organy nadzorcze państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Szwajcarii oraz Turcji w których produkt był bezpośrednio dystrybuowany, zostaną powiadomione przez firmę Teleflex.

Jeśli jest Pan/Pani dystrybutorem i/lub odpowiada Pan/Pani za zgłaszanie tego rodzaju informacji w obrębie lub poza obszarem EOG/CH/TUR, prosimy o powiadomienie stosownego organu nadzorczego o niniejszych działaniach. Prosimy o przesłanie powiadomienia oraz całej korespondencji ze stosownym organem nadzorczym w Państwa kraju do firmy Teleflex.

2. Teleflex

Teleflex informuje wszystkich klientów i pracowników Teleflex oraz dystrybutorów o niniejszych działaniach zapewniających bezpieczeństwo.

3. Proszę skontaktować się z właściwą osobą zajmującą się tą sprawą

W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji lub pomocy dotyczącej opisywanego problemu, prosimy o kontakt z:

Dział Obsługi Klienta

Kontakt: Shane Kenny

Faks: +353 (0)1 4370773

Telefon:

+353 (0)906460869

E-mail:

orders.intl@teleflex.com

Informujemy, że wszystkie stosowne organy nadzorcze państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Szwajcarii (EOG/CH) i Turcji, w których produkt był dystrybuowany bezpośrednio, zostaną powiadomione przez firmę Teleflex.

Za i w imieniu firmy Teleflex,

Karen Boylan

Karen Boylan

VP Global RA/QA

Zalacznik 2 - Strona 1 z 3

Product	Lot	Product	Lot	Product	Lot	Product	Lot	Product	Lot	Product	Lot	Product	Lot	Product	Lot	Product	Lot	Product	Lot	
103902-000035	13EG10C	103902-000045	14FE23C	103902-000060	13JG12C	103902-000065	14HE34C	103902050	14IE39	11CG22	103902060	12KG23	103902070	10FG11	103902080	12FG28	104201-000075	13JG12	13JG12	
	13FG15C		14GE30		13JG14	13JG41	13JG22	11CG25	12L603	10GG11		12FG36		13JG14						
	13FG34C		14HE33		13KG12C	13KG20	13JG24	11DE18	12L622	10GG34		12GG25		13JG40						
	13GE30C		14IE39C		13KG21C	13LG12	14BG23	11EE19	13AG17	10GG45		12GG37		13JG41						
	13IG03C		14JG02C		13KG31	14AE04	13JG12	11EE21	13BG08	10HE35		12GG38		13JG48						
	13IG31C	14JG03	13LG32C	14AG10	14AT20	11FE24	13BG28	10HG07	12HG06	13KG10										
	13JG22C	13BG28	13LT18C	14BG13	14CG28	11GE27	13BG33	10HG17	12HG07	13KG21										
	13KG11C	13CG34C	14AE05C	14BG21	14EG05	11GG36	13G01	10IE39	12HG15	13KG22										
	13LT18C	13EG02C	14AG10C	14CG14	14CG14	11HG19	13CG35	10JG27	12HG17	13KG31										
	14AE04	13FG07C	14AT20	14CG22	14CG22	11HG35	13DG06	10KE47	12IG05	13LG11										
	14AE04C	13FG34C	14BG07	14DG05	14DG05	11IE37	13DG15	10KG23	12IG06	13LT08										
	14CE10	13GE30C	14BG21	14DG17	14DG17	11JE41	13DG31	10KG24	12IG07	14AE04										
	14CE11	13IG15C	14BG30	14DT03	14DT03	11JE42	13EG02	12IG17	12IG17	14AG10										
	14DG05	13IG28C	14BG30C	14EG04	14EG04	11JE43	13EG10	12IG18	12IG18	09LE49										
14FE23C	13IG31C	14CG28	14EG31	13JG12	11JG16	13EG14	11BE06	12IG24	09LG05											
14HE34	13JG41	14CG28C	14FG18	14FG18	11KE45	13EG34	11BG06	12IG25	10AE03											
103902-000040	13CG12	103902-000050	13KG21C	103902-000075	14DG07	103902070	14FT04	13KG20	11KE46	13FG02	104201-000070	13FG02	104201-000075	11CG03	104201-000075	12IG26	104201-000075	11CG03	11CG03	
	13EG11C		13KG31		14EG05		14EG05	14FG19	11LE51	13FG18		11CG05		12IG05		10BE07				
	13FG03C		14AT20		14FE23C		14GG30	14FT04	11LG23	13GE29		11CG22		12IG16		10CE10				
	13FG32C		14CE11		14FG26C		14IE39	14GG10	11LG33	13GG04		11CG33		12JG24		10CG03				
	13GE29C		14HE33C		13IG15		13IG22	13IG22	12AG26	13GG13		11DE14		12JG29		10DE15				
	13HG16C	14DG07	14HG11	13JG22	14CG30	12AG27	13GG39	11DE17	12JG40	10DE18										
	13IG15C	14DG13C	14IE37C	13JG41	14FG18	12AG29	13GG44	11EE19	12KG05	10DG12										
	13IG31C	14ET22C	14IE39C	13JG43	09LE49	12AG51	13HE33	11EE20	12KG23	10DG17										
	13IG32C	14FE23	14JG03	13KG31	10AE02	12BG21	13IG03	11EE21	12KG26	10DG18										
	13IG34C	14HG12	13BG08	13LG36	10AE03	12BG25	13IG12	11FE24	12LG03	10EE22										
	13JG14	14HG12C	13BG25	14AG10	10AE04	12BG26	13IG17	11FE25	12LG19	10EG04										
	13JG14C	14IE39C	10AE05	14BG07	10AE05	12CG11	13IG30	11GE29	12LG24	10EG10										
	13KE45	14IG18C	13CG33C	14BG21	10BE07	12CG15	13JG30	11GG34	13AG15	10EG11										
	13KG08C	14JG02C	13EG02C	14CE10	10BE08	12DG04	13JG40	11HG03	13AG29	10FE25										
13KG11C	14JG03	13EG13C	14CG30	10CE10	12DG12	13JG41	11HG20	13AG34	10FG04											
103902-000045	14AE05	103902-000055	13AG34	103902-000065	13FG14C	103902035	14EG04	10CG07	10CG07	12DG19	104201-000070	13JG43	104201-000075	11HG35	104201-000075	13BG13	104201-000075	11HG35	10FG10	
	14AE05C		13BG28		13FG32C		14EG05	10DE15	12DG26	13JG48		11IE37		13BG32		10GG11				
	14BG15		13CG34C		13GE30C		14EG32	10DE18	12DG29	13KG09		11IE42		13BG36		10GG22				
	14BG30		13EG13C		13GG42C		14GE30	10DG17	12DG36	13KG11		11JE43		13BG39		10GG34				
	14CE11		13EG34C		13HE34C		14HG10	10EE22	12EG05	13KG31		11JG10		13BG40		10GG43				
	14DG05C	13FG16C	13HG24C	14IE37	10EG04	12EG30	13LE50	11KE45	13CG38	10HE35										
	14HE34	13FG17C	13HT16C	14JG09	10EG15	12EG35	13LG11	11KE47	13DG03	10HG17										
	14IE37C	13GE30C	13IG16C	13JG22	10FE25	12EG45	13LG33	11KG39	13DG06	10IE39										
	14IE39	13IG03C	13IG17C	13IG17C	10FG04	12FG02	14AE04	11LG22	13DG15	10IG05										
	14IE39C	13IG17	13IG32C	13LT18	10FG10	12FG26	14AG02	11LG33	13DG33	10JG27										
	103902-000045	13FG03C	103902-000055	13IG18C	103902-000065	13IG34C	103902035	14EG28	104201-000070	10GG22	12GG22	104201-000075	14AT20	104201-000075	12AG27	104201-000075	13DG38	104201-000075	10KE47	10KE47
		13FG32C		13IG28C		13JG13C		14FG26	10GG23	12GG24	09LE49		12AG29		10KG16					
		13GE29C		13JG22		13JG14		14HE34	10GG34	12GG38	09LG05		12AG34		10LG12					
		13IG12C		13JG24		13KG11C		13IG34	10GG35	12GG40	10AE02		12AG39		10LG29					
13JG12C		13KG22C		13KG20C		14AE05		10HE35	12GG51	10AE03	12AG51		10LG35							
13JG14C		13LG13	13KG21	14EG05	10HG07	12GG52	10AE04	12BG22	13FG02	11AE03										
13KG11C		14AG10C	13LE50C	14GG10	10HG17	12HG08	10AE05	12BG39	13FG18	11AE04										
13KG31C		14BG15	13LG11	14GG30	10IG05	12HG16	10BE07	12CE12	13FG30	11AG23										
13LG35C		14BG23	13LG11C	14HE34	10JG09	12IG05	10BE08	12CG06	13FG32	11BG05										
14AG22		14CE11C	13LG13C	13JG14	10JG28	12IG06	10CG13	13GE29	13FG29	11BG07										
14BG09		14CG28C	13LG32	14AG22	10KG21	12IG18	10CG14	12DG12	13GG04	11CE13										
14CE10C		13BG24	13LG32C	14EG28	10LG08	12IG19	10DE15	12DG28	13GG39	11CG04										
14CG22		13EG02C	14AE05C	14GE30	10LG29	12IG22	10DE18	12DG36	13HE33	11CG05										
14CG30		13EG36C	14AG22	14GG09	11AE03	12IG24	10DG01	12EG05	13HG06	11CG22										
14DG07	13FG32C	14CG14C	14IG13	11AE04	12JG05	10DG02	12EG28	13IG03	11DE14											
14DG07C	13GE30C	14DG13C	13JG22	11BE06	12JG16	10DG12	12EG29	13IG17	11DE17											
14EG04	13IG16C	14FE23C	14BG09	11BE07	12JG25	10DG18	12FG04	13IG18	11DE18											
14EG07C	13IG20C	14FG26C	14DG05	11BG07	12JG38	10EG04	12FG14	13IG30	11EE19											
14EG32	13IG31C	14HE33C	14GG10	11CE13	12JG40	10FE25	12FG26	13IG31	11EE20											

Product	Lot	Product	Lot	Product	Lot	Product	Lot	Product	Lot	Product	Lot	Product	Lot	Product	Lot	Product	Lot	Product	Lot
	11FE22		12HG15		13IG20		10LG08		12CG11		13BG36		14FG09		10KE48		12IE36		13LG13
	11FE23		12HG16		13IG20C		10LG29		12DG03		13BG39		14FG16		10KG07		12IE37		13LG15
	11FE26		12IG06		13IG26		10LG35		12DG04		13CG12		14HG09		10KG13		12IE38		13LG24
	11GE27		12IG07		13IG28		11AE02		12DG14		13CG27	104202-70SR	14HG10		10KG17		12IE40	104203-000070	13LG29
	11GG33		12IG18		13JG02		11AE03		12DG19		13CG33		13CG16		10KG24		12IE42		14AG15
	11GG34		12IG19		13JG02C		11BE06		12DG22		13CG36		13GG28		10LG12		12IE43		14AG26
	11GG36		12IG29		13JG10		11BE07		12DG23		13CG38		13HG01		11AE03		12IE44		14AG34
	11HG18		12IG05		13JG29		11BG04		12DG24		13DG15C		14FG09		11AG19		12KE45		09LE49
	11HG20		12IG12		13JG31		11BG06		12DG26		13DG32		14FG21		11AG22		12KE46		09LE50
	11HG36		12IG29		13JG41		11CE13		12DG28		13DG32C	104202-70STR	13BG30		11AG35		12KE47		09LE51
	11IE37		12IG38		13JG43		11CG02		12DG29		13EG02		13CG23		11BE09		12KE48		10AE03
	11IG22		12IG40		13JG44		11CG04		12DG30		13EG11		13CG28	104203-000070	11BG13		12LE49		10AE04
	11IE41		12KG04	104202-000070	13JG48		11CG05		12DG31		13EG13		14FG05		11CG11		12LE50		10AE05
	11IE42		12KG14		13KE45C		11CG25		12DG36		13EG22		14FG21		11CG23		12LE51		10BE08
	11IE43		12KG15		13KG13		11CG33		12EG05		13EG34		14HE33		11DE14		12LE30		10CE13
	11IG10		12LG03		13KG20		11DE14		12EG06		13FG02		14HG09		11DE15		13AG06		10CG13
	11IG24		12LG11		13KG21		11DE17		12EG26		13FG05		14HG10		11DE17		13AG12		10DE14
	11KE45		12LG20		13KG23		11DE18		12EG30		13FG07	104202-75SR	13CG16		11EE21		13AG21		10DE15
	11KE46		12LG22		13LE52		11EE19		12EG35		13FG17		13GG15		11EE22		13AG32		10DE16
	11KG39		12LG23		13LG12		11EE20		12EG45		13FG30		13GG28		11FE23		13BG08		10DE17
	11LG18		12LG24		13LG34		11EE21		12EG48		13FG33		13GG38		11FE24		13BG12		10DE18
	11LG23		13AG01		13LT18		11GE27		12FG25		13GE29		13HG01		11FE26		13BG21		10EE19
	11LG33		13AG02		14AE05		11GE29		12FG28		13GG04		13IG01		11GG35		13BG26		10EE21
	12AG26		13AG03		14AG02		11GG34		12GG02		13GG11		14FG09		11HE33		13CG20		10FE23
	12AG29		13AG11		14AG10		11GG36		12GG05		13GG39	104202-75STR	14FG21		11HE34		13DG11		10FE24
	12AG31		13AG15		14AG12		11HG04		12GG24		13GG43		14HG03		11HG36		13DG32		10GG10
	12AG34		13AG30		09LE49		11HG18		12GG32	104202-000075	13HE33		09LE49		11IE37		13DG39		10GG21
	12AG47		13BG08		09LG05		11HG20		12GG37		13HE33C		09LE50		11IE38		13EG07		10GG25
	12AG51		13BG11		10AE02		11HG35		12GG51		13HG14		09LE51		11IE39		13EG20		10GG29
104202-000070	12BG08	104202-000070	13BG27		10AE03	104202-000075	11IE37	104202-000075	12GG52		13HG16		10AE02		11IE40	104203-000070	13EG26		10GG30
	12BG22		13BG28		10AE04		11IG03		12GG07		13IG26		10AE03		11IE44		13EG28		10HE32
	12BG25		13BG33		10AE05		11IG20		12HG11		13IG28C		10AE05		11KE45		13EG34		10HG13
	12BG26		13BG34		10BE07		11IE41		12HG14		13IT16		10BE07		11KE48		13EG36		10IG03
	12CE12		13CG10		10BE08		11IE42		12HG15		13JG22		10CE10		11LE49		13FG12	104203-000075	10IG11
	12CG06		13CG12		10CG13		11IE43		12HG17		13JG40		10DE15		11LE50		13FG20		10IG20
	12DG12		13CG27		10CG14		11JG16		12IG06		13JG41		10DE17		11LG10		13FG24		10IE43
	12DG14		13CG34		10DE18		11JG21		12IG14		13JG48		10DE18		12AG26		13FG29		10IG31
	12DG18		13CG36		10DG02		11JG24		12IG16		13KG09		10EE19		12AG27		13FG35		10IG38
	12DG21		13DG13		10DG12		11KE45		12IG19		13KG09C		10EE20		12AG43		13FG36		10IG41
	12DG22		13DG15C		10DG17		11KE46		12IG20		13KG10		10EE22		12AG49		13GG01		10KE47
	12DG23		13DG43C		10DG18		11KE47		12IG26		13KG13		10FE23		12BE08		13GG38		10KE48
	12DG24		13EG13		10EG04		11KG37		12IG15		13KG23	104203-000070	10FE24	104203-000070	12BG13		13HG01		10KG17
	12DG29		13EG21		10EG10		11KG39		12JG24		13KG31		10FE25		12CE12		13HG22		10KG24
	12DG36		13EG22	104202-000075	10FE25		11KG40		12JG38		13LG11		10GG11		12CG11		13HG23		10LG14
	12EG02		13EG34		10FG10		11LG18		12KG05		13LG14		10GG18		12CG15		13IG01		10LG20
	12EG05		13FG02		10GG10		11LG31		12KG09		13LG32		10GG25		12DE14		13IG11		10LG32
	12EG35		13FG15		10GG11		11LG33		12KG14		13LG34		10GG26		12DE16		13IG13		11AE05
	12EG45		13FG30		10GG22		11LG44		12KG23		13LG35		10HE33		12EE19		13IG34		11AG05
	12EG48		13FG31		10GG33		11LG46		12LG05		13LT18		10HG13		12EE20		13IG03		11AG38
	12FG14		13GE29		10GG34		12AG23		12LG06		14AE04		10HG15		12EE21		13IG24		11CE10
	12FG26		13GG04		10GG43		12AG51		12LG11		14AG09		10IE39		12EE22		13IG28		11CG11
	12GG02		13GG11		10GG45		12BG09		12LG22		14AG22		10IG02		12FE23		13IG36		11CG20
	12GG22		13GG12		10HE35		12BG12		12LG24		14AT20		10IG18		12FE24		13IG45		11DE14
	12GG25		13GG43		10HG17		12BG21		13AG11				10IE43		12FE25		13IG47		11DE16
	12GG34		13GG44		10IG05		12BG22		13AG17				10IG05		12FE26		13KG07		11DE17
	12GG42		13HG05		10JG27		12BG25		13AG21				10JG07		12GE27		13KG25		11EE21
	12GG50		13HG24		10JG28		12BG26		13AG29				10KE47		12GE28		13KG26		11FE23
	12GG51		13HT16C		10KE47		12BG39		13BG13						12GE29		13KG30		11FE25
	12HG08		13IG04		10KG16		12CE12		13BG24						12GE31		13LG02		11GE27
	12HG10		13IG06		10KG21		12CG06		13BG32						12HE33		13LG07		11GE28

Zalacznik 2- Strona 3 z 3

Product	Lot	Product	Lot	Product	Lot	Product	Lot	Product	Lot	Product	Lot	Product	Lot
104203-000075	11HE34	104203-000075	13FG24	104204-000070	10KE48	104204-000070	13AG12	104204-000075	10EE19	104204-000075	12EE21	104204-000075	13KG30
	11HE35		13FG27		10KG07		13AG14		10EE21		12EE22		13LG13
	11IE38		13FG29		10KG13		13AG21		10FE23		12FE24		13LG15
	11JE40		13FG35		10LE49		13AG31		10FE24		12FE25		13LG26
	11JE41		13GG01		11AG05		13AG32		10FE25		12FE26		13LG37
	11JE44		13GG22		11AG16		13BG08		10GG01		12GE27		14AG03
	11KE46		13GG40		11AG35		13BG26		10GG18		12GE29		14AG09
	11KE47		13HG01		11CE12		13CG26		10GG25		12GE31		14AG17
	11KE48		13HG22		11CG20		13CG40		10GG26		12HE33		14AG32
	11LE50		13IG09		11DE15		13DG01		10GG29		12IE36		10KG15
	11LE52		13IG11		11DE16		13DG30		10HE32		12IE37		12GE30
	12AG43		13IG14		11EE19		13DG37		10IE39		12JE40		10KE47
	12AG49		13IG17		11EE22		13DG41		10IG02		12JE41		12GE30
	12BE09		13IG34		11FE26		13EG07		10IG12		12JE42		11AG20
	12BG13		13JG03		11GE28		13EG32		10JG03		12JE43		12GE30
	12CE12		13JG28		11HE33		13EG36		10JG23		12JE44		12KG17
	12DE14		13JG31		11HE34		13FG09		10JG31		12KE46		13CG27
	12DE17		13JG34		11HE35		13FG17		10JG38		12KE47		13IG37
	12DE18		13JG36		11IE38		13FG29		10KG13		12KE48		
	12EE20		13JG45		11JE40		13FG32		10LE49		12LE49		
	12EE22		13KG01		11JE41		13GG19		10LG06		12LE50		
	12FE24		13KG07		11JE44		13GG22		10LG12		12LE51		
	12FE25		13KG10		11KE45		13GG42		10LG17		12LG21		
	12FE26		13KG26		11KE46		13HG01		10LG32		13AG10		
	12GE27		13LG02		11KE48		13HG22		11AE03		13AG14		
	12GE28		13LG13		11LE50		13IG01		11AG30		13AG22		
	12GE29		13LG17		11LE52		13IG07		11AG38		13AG24		
	12GE30		13LG24		12AG43		13IG13		11BE09		13AG26		
	12GE31		14AG20		12AG49		13IG21		11CG20		13BG21		
	12HE32		14AG32		12BE08		13IG33		11DE14		13BG22		
	12HE33		14AG34		12BE09		13IG34		11DE16		13CG21		
	12IE36		09LE49		12CE12		13JG04		11DE17		13CG40		
	12IE37		09LE50		12CG36		13JG28		11EE20		13DG22		
	12IE38		10AE02		12DE14		13JG36		11EE21		13DG35		
	12IE39		10AE03		12DE15		13JG45		11FE23		13DG41		
	12JE41		10BE08		12EE19		13JG47		11FE26		13EG12		
	12JE42		10CE10		12EE20		13KE48		11HE32		13EG23		
	12JE44		10DE15		12EE21		13KG26		11HE33		13EG26		
	12KE46		10DE17		12EE22		13LG07		11HE34		13EG28		
	12KE47		10DE18		12FE24		13LG13		11HE35		13FG24		
	12KE48		10EE19		12FE25		13LG15		11IE38		13FG29		
	12LE50		10EE21		12FE26		13LG29		11JE40		13FG35		
12LG21	10EE22	12GE27	14AG03	11JE43	13GG01								
13AG08	10FE24	12GE29	14AG13	11JE44	13GG04								
13AG10	10FE25	12GE30	14AG17	11KE45	13GG19								
13AG12	10FG01	12GE31	14AG26	11KE48	13GG42								
13AG24	10GG01	12HE33	14AG32	11LE50	13HG01								
13AG26	10GG10	12IE36	09LE49	11LE51	13HG04								
13BG32	10GG14	12IE37	09LE50	11LE52	13HG20								
13BG34	10GG20	12JE40	09LE51	12AG43	13IG07								
13BG36	10GG25	12JE42	10AE02	12AG47	13IG13								
13CG20	10HE32	12JE43	10AE04	12AG59	13IG33								
13DG08	10HG13	12KE45	10BE07	12BE06	13JG01								
13EG03	10HG15	12KE46	10BE08	12BE09	13JG19								
13EG05	10IE39	12KE47	10CE10	12CG11	13JG31								
13EG10	10IG06	12KE48	10CE13	12CG36	13JG34								
13EG23	10IG12	12LE50	10DE14	12CG42	13JG36								
13EG28	10JG03	12LE51	10DE15	12DE15	13JG45								
13FG09	10JG25	12LG27	10DE17	12EE19	13KG07								
13FG12	10KE47	13AG04	10DE18	12EE20	13KG26								