



Helping all people
live healthy lives

NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA

Dotycząca wyników wrażliwości *E. faecium*, uzyskanych w systemie BD Phoenix™

Kwiecień 2012

<u>Nazwa Produktu</u>	<u>Numer Kat.</u>	<u>Numery Wersji</u>
Oprogramowanie Systemu BD Phoenix™	448035/448046	5.55R, 5.66A, 5.70A, 5.75A, 5.83A, 6.01A
Płyty Aktualizacyjne BD Phoenix™ (PUD)	441107/448047	4.51R, 4.65G, 4.61A, 4.65A, 4.71A, 4.75A, 4.81A, 4.91A, 5.11A, 5.15A, 5.21A

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy przedstawić Państwu schemat obrazujący sposób postępowania w sytuacji, kiedy istnieje konieczność potwierdzenia wyników „Wrażliwy na wankomycynę” (Vancomycin Susceptible) dla *E. faecium* przy pomocy dodatkowych testów mikrobiologicznych. Prosimy postępować zgodnie z instrukcją aż do momentu zainstalowania nowego oprogramowania.

Prosimy postępować zgodnie ze schematem na kolejnej stronie listu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem BD.

Dziękujemy za Państwa nieustanne wsparcie.

Marek Fiksa
Kierownik Sprzedaży BDDS
CEE/ Poland


Alina Chorążyczewska
Przedstawiciel ds. obsługi klienta
Koordynator ds. rejestracji, Poland

BECTON DICKINSON POLSKA Spółka z o.o.
ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa
tel. +48 /22/ 651 75 88, fax +48 /22/ 651 75 89
NIP: 527-10-55-984, REGON: 011697403



BD

Helping all people
live healthy lives

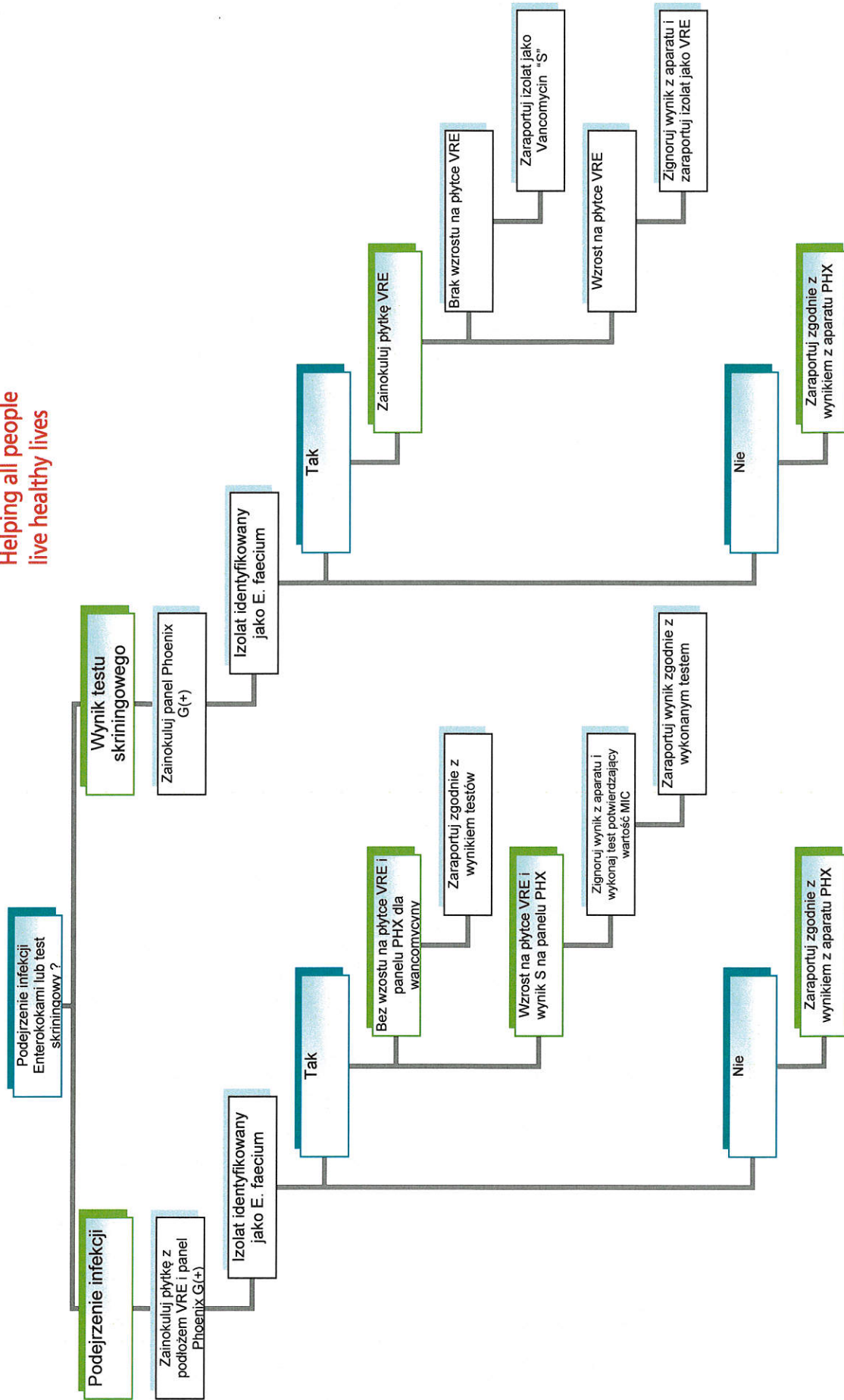

Schemat do potwierdzenia wyników „Wrażliwy na wankomycynę” dla izolatów *Enterococcus faecium*