



PILNE ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

GE Healthcare

Healthcare Systems
9900 Innovation Drive
Wauwatosa, WI 53226
USA

Znak wewn. GE Healthcare: FMI 80145

12 lipca 2012

Do: Administratorów szpitali
Kierowników Zakładów Radiologii
Kierowników ds. Zarządzania Ryzykiem

DOTYCZY: Aplikacja serwera AW Results Viewer (przełęczarka serwera AW) może mieszać dane obrazów pomiędzy dwoma różnymi pacjentami

Firma GE odkryła niedawno potencjalny problem związany z bezpieczeństwem dotyczący przeglądarki Results Viewer na serwerze AW.

Prosimy upewnić się, że wszyscy potencjalni użytkownicy w placówce zostali poinformowani o tym powiadomieniu dotyczącym bezpieczeństwa oraz o zalecanych działaniach.

Problem dotyczący bezpieczeństwa

Po uruchomieniu przy wybranych seriach danych pacjentów piksele i niektóre dane opisowe pochodzące od innych pacjentów są wyświetlane na jednym z okien ekranu. Problem pojawia się sporadycznie, w sytuacjach gdy kilku użytkowników równocześnie korzysta z przeglądarki Results Viewer. Więcej informacji znajduje się na rysunku dot. problemu związanego z bezpieczeństwem na stronie 3.


Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Należy zaprzestać wyświetlania obrazów za pomocą przeglądarki Results Viewer na serwerze AW. Obrazy można przeglądać za pomocą aplikacji 2D Viewer. Aplikacja 2D Viewer obsługuje wszystkie typy obrazów za wyjątkiem radiografii komputerowej (CR).

Dane szczegółowe problematycznego produktu

Problem dotyczy następujących wersji oprogramowania serwera AW:
AW Server 1- wersje aws-1.0-4.0, aws-1.0-4.1 i aws-1.0-4.2,
AW Server 2 - wersje aws-2.0-4.0 i aws-2.0-5.0

W celu określenia Państwa wersji oprogramowania serwera AW należy otworzyć program AW Server i odnaleźć numer wersji w lewym górnym rogu na ekranie logowania (tak, jak przedstawiono poniżej - numer wersji zaznaczono w czerwonym polu).

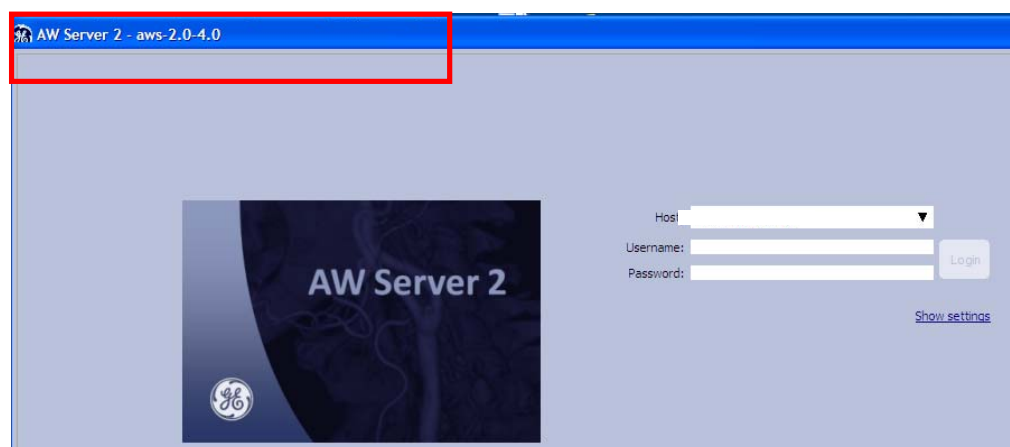

Korekta dotycząca produktu

Firma GE Healthcare zobowiązuje się dokonać nieodpłatnie napraw wszystkich zainstalowanych wersji oprogramowania na kwestionowanych serwerach AW poprzez udostępnienie aktualizacji oprogramowania. Przedstawiciel serwisu GE Healthcare skontaktuje się z Państwem w celu dokonania ustaleń dotyczących naprawy.

Informacje kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań związanych z powyższą "Informacją dotyczącą bezpieczeństwa produktu" bądź z określeniem zakresu objętych nią produktów, uprzejmie prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem sprzedaży lub serwisu GE.

GE Healthcare potwierdza, iż niniejszy dokument został przekazany do wiadomości odpowiednich organów państwowych.

Pragniemy zapewnić, że utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa stanowi dla nas najwyższy priorytet. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o natychmiastowy kontakt.

Dziękujemy!




James Dennison
Wiceprezes QARA
GE Healthcare Systems



Douglas M. Hansell, M.D., MPH
Dyrektor Medyczny
GE Healthcare

Rysunek dotyczący kwestii bezpieczeństwa

Przeglądarka Results Viewer na serwerze AW jest jednym z narzędzi używanych do przeglądania obrazów. W niektórych okolicznościach, po uruchomieniu przy wybranych seriach pacjenta A piksele i niektóre dane opisowe pochodzące od innego pacjenta (B) są wyświetlane na jednym z okien ekranu. Poniżej znajduje się przykład.

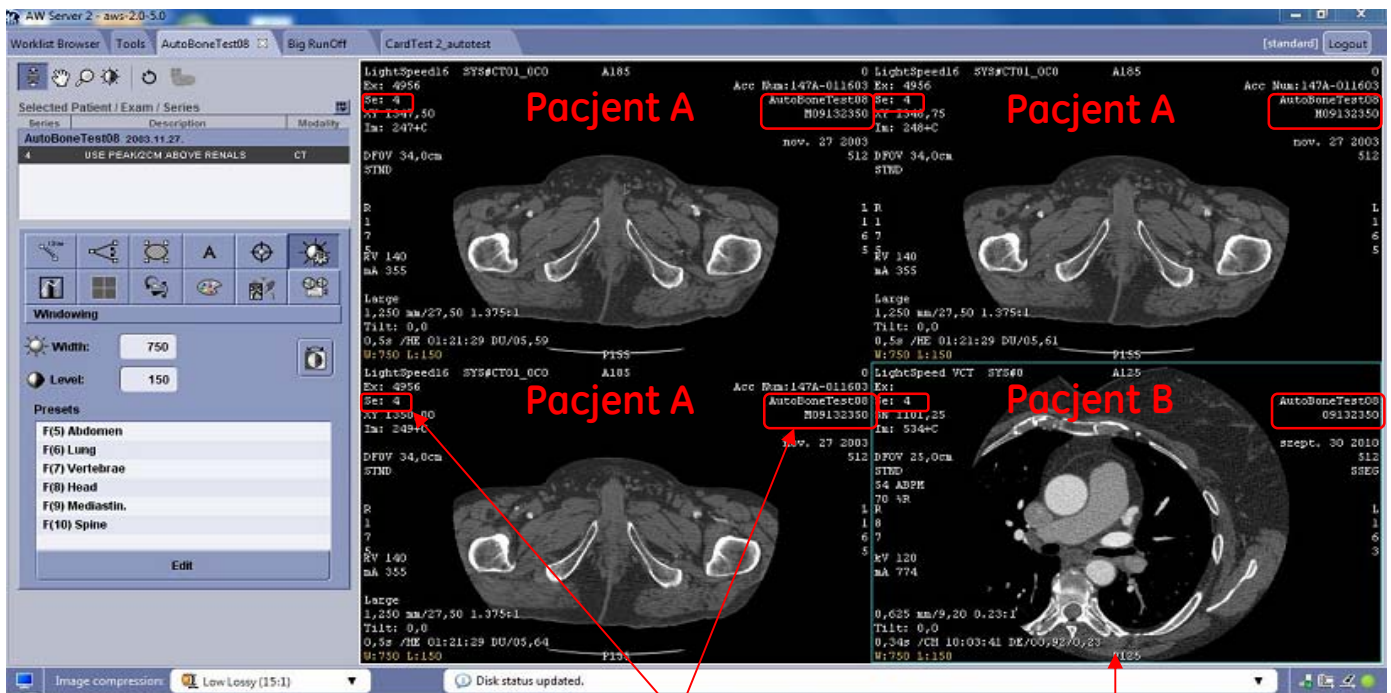

Identyfikator pacjenta, imię i nazwisko pacjenta, numer serii są takie same na wszystkich oknach ekranu (przedstawione w prostokątach)

Obraz i inne opisy pochodzące od innego pacjenta są wyświetlane (przedstawione w prawym dolnym oknie ekranu)