



**PILNE ZAWIADOMIENIE  
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

GE Healthcare

Healthcare Systems  
9900 Innovation Drive  
Wauwatosa, WI 53226  
USA

Znak wewn. GE Healthcare: 74052, 74053

piątek, 3 lutego 2012

Do: Dyrektorów szpitali / Zarządzających ryzykiem  
Inżynierów biomedycznych  
Kierowników obrazowania ogólnego/diagnostycznego

DOTYCZY: **temperatury głowicy sondy w systemie GE LOGIQ P6.**

Firma GE Healthcare wykryła w ostatnim czasie problem dotyczący bezpieczeństwa użytkowania systemu LOGIC P6, który może wpływać na bezpieczeństwo pacjentów. **Prosimy upewnić się, że wszyscy potencjalni użytkownicy w placówce zostali poinformowani o tym powiadomieniu dotyczącym bezpieczeństwa oraz o zalecanych działaniach.**

**Problem dotyczący bezpieczeństwa** System LOGIQ P6 GE może powodować nagrzewanie się głowicy sondy powodując oparzenia u pacjentów lub personelu obsługującego sprzęt.

**Dane szczegółowe problematycznego produktu** GE LOGIQ P6 BT09 oraz BT11 DIAGNOSTIC ULTRASOUND SYSTEM.

**Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa** Prosimy zaprzestać używania systemu do skanowania pacjentów.

**Korekta dotycząca produktu** Firma GEHC naprawi bezpłatnie usterkę.

**Informacje kontaktowe** W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego problemu prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy GE Healthcare lub kontakt telefoniczny z internetowym działem pomocy technicznej w każdej siedzibie.

T : +48 662 056 347 / +48 22 330 83 99

GE Healthcare potwierdza, iż niniejszy dokument został przekazany do wiadomości odpowiednich organów państwowych.

Pragniemy zapewnić, że utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa stanowi dla nas najwyższy priorytet. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o natychmiastowy kontakt.

Dziękujemy!

James Dennison  
Wiceprezes QARA  
GE Healthcare Systems

William Denman, M.D., FRCA  
Dyrektor Medyczny  
GE Healthcare