

Dział: **AFTER SALES**

Temat: **TECHNICAL BULLETIN L-017**

Data: **26.08.2011**

Produkt: **PLANMECA DELIGHT**

Autor: **Olli Heikkinen**

Wydany przez: **Maija Lampinen**

Notatka bezpieczeństwa


Firma Planmeca została poinformowana o przypadkach, w których żarówka Delight eksplodowała w miejscu jej eksploatacji, w wyniku czego gorące odłamki szkła spadały z lampy operacyjnej.

Większą osłonę zabezpieczającą zastosowano w maju 2007 roku. Większą osłonę zabezpieczającą należy zainstalować we wszystkich lampach operacyjnych Delight wyprodukowanych przed 24.05.2007 roku (tych wyposażonych w mniejszą osłonę zabezpieczającą) podczas najbliższej corocznej konserwacji. Wszystkie stare osłony zabezpieczające powinny zostać wymienione do końca roku 2012.

Proszę zamawiać większe osłony zabezpieczające w dziale części zamiennych Planmeca, używając kodu zamówienia 10014291.

Uwaga! Lampa operacyjna wykorzystuje żarówkę halogenową Osram 24V 150W Xenophot Longlife oznaczoną numerem HLX 64642. Numer części Planmeca to 436009. **Nie należy stosować innych żarówek.**

Uwaga! Podczas demontażu żarówki należy posłużyć się osłoną zabezpieczającą, którą żarówka jest owinięta. Nie należy dotykać powierzchni żarówki palcami.

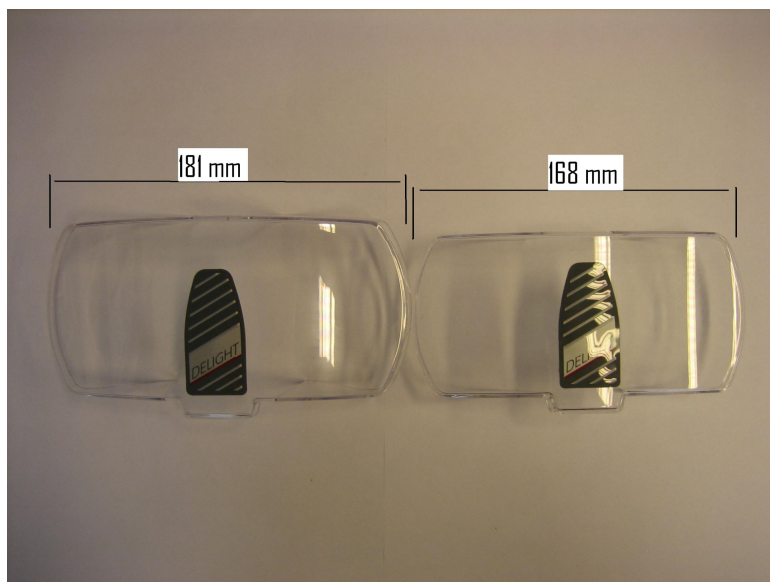

Ilustracja 1 Nowszą i większą osłonę zabezpieczającą pokazano z lewej strony, a starszą i mniejszą – z prawej.

Poniższy podpis poświadcza, że niniejsza notatka została zgłoszona do odpowiedniej agencji regulacyjnej.

Olli Heikkinen, Dyrektor ds. jakości