



Załącznik A (Kontrola przewodów w zestawach z pompą do żywienia dojelitowego Kangaroo pod kątem obecności powietrza)

Aby sprawdzić, czy w zestawie do żywienia nie znajduje się powietrze (patrz przykład poniżej), należy wykonać opisane poniżej czynności.

- Po zamontowaniu i napełnieniu zestawu do żywienia należy nacisnąć przycisk „Run” (Uruchom) znajdujący się na pompie.
- Po upływie 30 sekund należy zacząć obserwować przewód pomiędzy pompą a pacjentem, aby upewnić się, że do przewodu nie dostaje się powietrze.
- Po kontroli pompy pod kątem niedrożności może zdarzyć się, że w przewodzie do żywienia znajdzie się niewielka ilość powietrza (około 1,3 cm [1/2 cala]). To zjawisko nie jest nietypowe i nie stanowi problemu.
- **Nie należy używać zestawu do żywienia**, jeśli szczelina powietrzna jest **większa niż 2,5 cm**.
- **Nie należy używać zestawu do żywienia**, jeśli widoczne są pęcherzyki powietrza, które łącznie **są większe niż 2,5 cm**.

UWAGA:

Obecność powietrza w przewodzie jest zjawiskiem przejściowym i nie dotyczy całych partii. W związku z tym, jeśli zestaw do żywienia okaże się wadliwy, niekoniecznie będzie to oznaczać, że problem dotyczy całej partii.



*Na ilustracji przedstawiono przykładowy przewód, w którym znajduje się powietrze. Nie zawsze szczelina powietrzna będzie tak wyraźnie widoczna.