

PILNE — DZIAŁANIE NAPRAWCZE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA MEDYCZNEGO

Monitor przyłóżkowy XPREZZON firmy Spacelabs Healthcare

Administracja szpitala / dział inżynierii biomedycznej / sekretariat:

Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń

Monitor przyłóżkowy XPREZZON model 91393 firmy Spacelabs Healthcare

Opis problemu

Niniejszym pismem informujemy o potencjalnym problemie związanym z monitorem przyłóżkowym XPREZZON. Śruba mocująca zasilacza może uszkodzić wewnętrzny element, co w konsekwencji spowoduje niemożność włączenia lub wyłączenia monitora bądź jego samorzutne wyłączenie. Nie doszło do żadnych awarii w tym zakresie i nikt nie doznał żadnych obrażeń z powodu tego problemu.

Zalecenia dotyczące działań podejmowanych przez użytkownika

- Należy poinformować personel o tym potencjalnym problemie oraz o konieczności dokręcania śruby zasilacza jedynie palcami.
- Skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia akceptowanego przez obie strony terminu bezpłatnej aktualizacji w danej placówce wszystkich monitorów pacjenta, których to dotyczy.

Osoba odpowiedzialna — dane kontaktowe

Niżej podpisany potwierdza, że niniejsze zawiadomienie zostało przekazane odpowiednim urządzeniom nadzorującym.



Al Van Houdt, dział rejestracji i zgodności
Spacelabs Healthcare, Inc.
5150 220th Ave SE

Issaquah, WA 98029
Tel.: 1-425-657-7200
Faks: 1-425-657-7210

Lokalne dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących działania naprawczego należy w celu uzyskania pomocy technicznej skontaktować się z firmą Lifemed Poland sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19B w Warszawie, tel.: +48 22 862 83 75, e-mail: radoslaw.grabowski@lifemed.com.pl.